




# Prestige Medical<sup>©</sup>

Integrated decontamination solutions

Um sicherzustellen, dass Ihr Autoklav Ihnen lange Jahre die guten Dienste leistet, für die er konzipiert wurde, ist es uns wichtig an ein paar "Do's" und "Don'ts" in Bezug auf den Betrieb des Gerätes sowie zur Ausführung einfacher Pflege- und Wartungsverfahren auf einer täglichen Basis zu erinnern.

## Sorgen Sie bitte dafür, dass:

- 1 ... Sie diese Anweisungen vollständig lesen und immer den Arbeitsablauf befolgen.
- 2 ... Sie immer die tägliche Wartung, Pflege und Instandhaltung durchführen, wie im unteren Abschnitt beschrieben.
- 3 ... der Wasserstand eines jeden Zyklus nur mit sauberem und destilliertem oder entionisiertem Wasser erhalten wird.
- 4 ... das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung und nicht weniger als 25cm von der nächsten Wand aufgestellt wird.
- 5 ... Sie nur die originalen grünen Dichtungsringe verwenden und diesen erneuern wenn er sichtbar beschädigt ist, oder wenn er zu stark geschrumpft ist. Normalerweise ist die Lebensspanne nach 3-6 Monaten abgelaufen, abhängig von der Nutzungsintensität.
- 6 ... der Deckel richtig geschlossen ist (F2) wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, um das Risiko einer versehentlichen Beschädigung zu vermeiden; niemals das Gerät in Position (F1) stehen lassen.

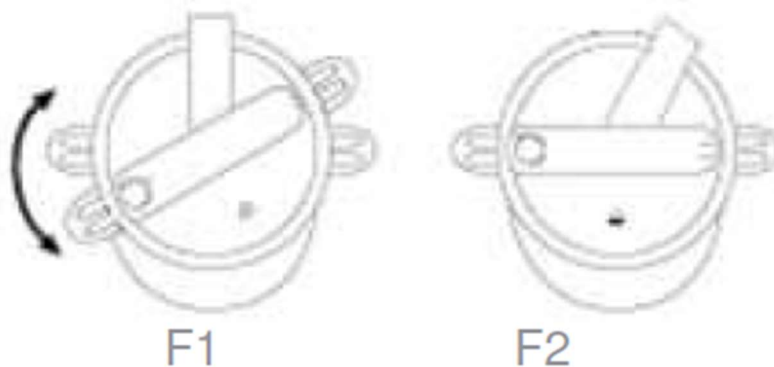

- 7 ... die Pfeile beim Montieren des Deckels immer aufeinander zu zeigen, um eine Beschädigung des Geräterandes und der Dichtfläche zu verhindern.
- 8 ..., wenn Sie den Deckel abnehmen, Sie diesen nach hinten wegheben, um Wassertropfen auf der Tastatur des Bedienfeldes zu verhindern (sorgen Sie dafür das Bedienfeld immer trocken zu halten).
- 9 ... Sie die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum bereithalten, wenn Sie Ihren Verkäufer betreffs Rückfragen oder Reklamationen kontaktieren.

## Unterlassen Sie bitte...

- 1 ... den Verlust der Betriebsanleitung.
- 2 ... das Hinzufügen von Chemikalien zum destillierten Wasser.
- 3 ... den Versuch, flüchtige oder toxische Stoffe, oder ungeeignete Materialien zu sterilisieren.
- 4 ... das Abstellen des Gerätes auf hitzeempfindlichen Oberflächen ( z.B. poliertes Holz oder Glas).
- 5 ... das Öffnen des Druckentlastungsventil (A) während des Sterilisationszyklus.
- 6 ... dass das Druckentlastungsventil (A) in der Position "offen" ist, wenn der Deckel verkehrt auf einer Arbeitsfläche abgelegt wird.
- 7 ... das Eintauchen des Gerätes oder Netzkabels in Wasser (während Reinigung und sonst auch nie).
- 8 ... dass das Gerät fallen gelassen wird.
- 9 ... den Betrieb des Gerätes in Risikobereichen (bei brennbaren Materialien oder Gasen).
- 10 ... den Versuch die Gerätesicherungen zu tauschen, bevor das Gerät vom Stromnetz abgesteckt wurde.
- 12 ... sich über das Gerät beim Abnehmen des Deckels zu beugen, das kann zu Verbrennungen durch aufsteigende Hitze und Dampf führen.
- 13 ... den Deckel oder den Dampfentlüftungsbereich abzudecken.

## Tägliche Pflege und Instandhaltung

### Grüner Dichtring

1. aus dem Deckel entfernen und mit warmem Seifenwasser reinigen;
2. gründlich abspülen und trocken schütteln, **NICHT TROCKEN WISCHEN**;
3. setzen Sie die Dichtung gleichmäßig unter alle Ansätze des Deckels, die Dichtung kann bis zur Verwendung leicht „faltig“ erscheinen;
4. erneuern Sie die Dichtung, wenn sich Anzeichen von Leckagen zeigen;
- 5 **NIEMALS DIE DICHTUNG SCHMIEREN ODER MIT ALKOHOL OD. CHEMIKALIEN REINIGEN!**

### Autoklav

1. reinigen Sie die Dichtflächen von Deckel und Gerät mit einem Topfreiniger (z.B. Scotch Brite), und stellen Sie sicher kein Metall damit abzuschleifen; wischen Sie die beide Dichtflächen mit einem feuchten Tuch in einem Durchgang nach;
2. reinigen Sie das Gerät innen und außen mit warmen Seifenwasser und stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile trocken gehalten werden (Bedienfeld und jene an der Geräteunterseite);
3. überwachen Sie den ersten Sterilisationszyklus des Tages, um die Luftablassvorrichtung im Deckel zu überprüfen, die Luftablassvorrichtung soll mit einem hörbaren "Klick" schließen;
4. fetten Sie an der **Unterseite des Gerätes** die Verschlusslaschen für den Deckel leicht mit "Vaseline" ein, falls der Deckel schwergängig wird;
5. Prestige Medical empfiehlt, dass Ihr Gerät einmal jährlich kalibriert wird;